

Grummons Protraction Face Mask

Reverse-pull uden TMJ-belastning

Fremstilles kun af Great Lakes




Bestillingsnr. VFM


Kun til engangsbrug

Vejledning om brugertilpasset montering

- (A)** Justeringer og tilpasning
For at blive siddende under søvn skal bøjlegrenen passe nøje til pandens og kindernes kontur.
- (B)** Justeringer skal foretages ved anvendelse af en justeringstang pkt. A og/eller B.
• Justeringstang 220-022.

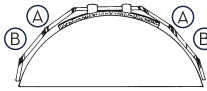


- (C)** Kan justeres, så det passer til et længere eller kortere ansigt. Pudren bør være over øjenbrynene for at opnå maksimal kontakt med overfladen, så patienten kan tale uden at flytte bøjlegrenen.

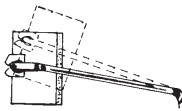

- (D)** Hvis tværstangen er for tæt på munden, skal kindpuderne bøjes indad for at øge afstanden fra tværstangen til munden.

- (E)** Justér tværstangen direkte med tænderne og lidt under mundlinjen. Dette let opadgående tryk vil holde bøjlegrenen mere fast på plads.

- (F)** Kasket fastgøres dér, hvor tindingen bøjer. Den bør sidde behageligt oven på hovedet. Den kan om nødvendigt hæftes eller sys for at gøre den kortere.

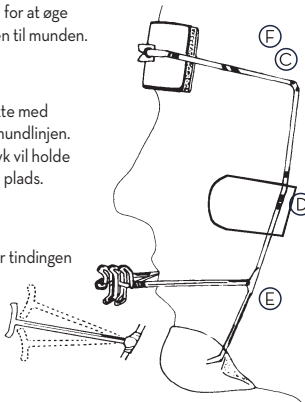

Gelforing til pande og kindstøtter maksimerer komforten. (UDEN LATEX)

Vaskbar, genanvendelig gelforing reducerer på effektiv vis:

- Friktion
- Forskydningskraft
- Slitage
- Tryk

Mundbuen

- 0.075 tommers trådtykkelse.
- Øget stabilitet og spændingsmulighed.
- Anvendes med valg af intraoralt anker.

Hovedbøjlefunktioner

- Fastgøres på ansigtsmaske med velcro, der er nemt at løsøre.
- Giver maksimal stabilitet.
- Nemt at bruge, behagelig når man sover.

Justerbar

- Lette kindbensstøtter af rustfrit stål.
- Tilpasses patientens individuelle knoglestruktur.
- Sikrer en perfekt pasform til alle ansigter uanset form.
- 30 graders hældning for at give komfort langs vævskonturer.

Pandestøtter

- Større for at give bedre patientkomfort.
- Letaftagelige ved udskiftning.
- Støbt i letvægtsplast.

Elastikker

- 5/16" 8 oz. leveres på anmodning.

Se oplysninger om salgsrestriktioner på hjemmesiden.

VIGTIG PÅMINDELSE TIL LÆGERNE!

For at undgå øjenskader, skal du sørge for at informere patienter og forældre om relevante sikkerhedsforholdsregler ved påsætning og aftagning af anordningen. Advar også patienterne mod hårdhændet eller farefuld leg, mens anordningen er påsat.

Indikation for behandling ved hjælp af Grummons ansigtsmaske

• Midfacial ortopædi

1. Maksillær protraktion af skelettet.
 - a. med RPE-anordning
 - b. med Herbst-anordning.
2. Cranio-facial/hareskår.
 - a. Korrektion af kollapsede maksillære segmenter (ved tidlig ganespalteoperation), hvilket forbedrer den optimale justering af tænderne.

• Protraktion af tandbue

• Underkæbe

1. Hvis det ydre bueelastiske træk er for højt i forhold til buetråden, ekstruderer kindtænderne med ændring af det okklusale plan.
2. Hvis den ydre bue er på niveau med buetråden, trækkes den nedre tandbue ud. Det er normalt den bedste placering og den foretrukne bevægelse.
3. Hvis den ydre bue er lavere end buetråden, vil fortænderne trænge ind/bryde ud, når de rykker frem.
4. Det foreslås at anvende mesiale rotationsbindinger til de første kindtænder i undermundens for at opnå modrotationseffekt mod de ekstraorale elastikker. En rund buetrådsoverlejring til den tokoblede intrusionsbuetråd gør det muligt at fremføre den nederste bue.
5. Behandl overbiddet før overjet, ellers vil protraktionen af den nedre tandsætning bidrage til tilhørende kondylær distalisering af underkæben, når fortænderne fortsat overlapper for meget.

• Anvendelse efter kæbeoperation

1. Postkirurgisk for at opretholde maksillær fremrykning og antero-posterior korrektion.
2. Postkirurgisk for bevidst at øge den anteroposteriore maksillære fremrykning.
3. Postkirurgisk for at opretholde/fremme inferior repositionering med forøgelse af posterior ansigtshøjde.

• Mundbue

1. Med faste ortodontiske anordninger.

• TMJ-behandlingsaspekter

1. Protraktion af den øvre tandbue gør det muligt at rykke underkæben fremad for at opnå bedre diskondylkoordinering og kondyl-diskus-fossa-forhold.
2. Undgå klasse III elastisk udnyttelse, da disse har tendens til at komprimere/belaste TMJ-komponenterne på en forkert måde og giver samtidig anledning til øget hyperaktivitet af tyggemusklens samt myalgi.

• Headgear-etuier til rådighed

- Sort..... 830

Returneringer efter 30 dage bliver påført et 15% efterfyldningsgebyr, medmindre varen er blevet beskadiget under forsendelse eller tilsendt ved en fejl. Dette gælder ikke for specialfremstillede anordninger.