


# Great Lakes NOLA high-pull hoofdkapje

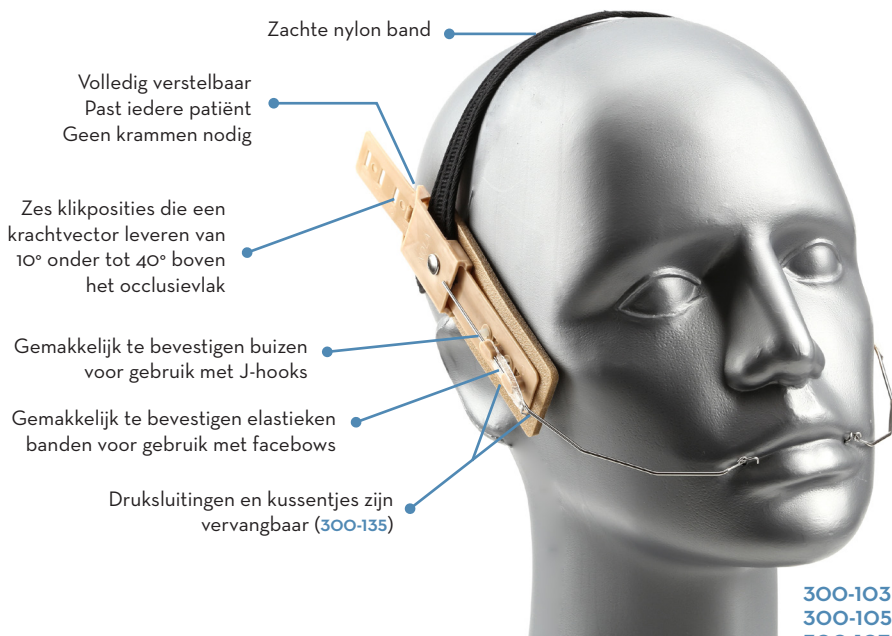

BESTELINFORMATIE AAN ACHTERKANT ►

## Het veiligheidsvoordeel van de NOLA headgear met J-hook

In vergelijking met de breakaway apparaten die worden gebruikt met de momenteel verkrijgbare facebows, is J-hook Headgear even veilig of veiliger. Facebows zijn potentieel gevaarlijk omdat beide zijden zijn bevestigd en de uiteinden van de binnenkant op het gezicht gecentreerd zijn.

Bovendien kan bij de meeste breakaway apparaten de facebow uit de mond worden genomen voordat een afbreekkracht wordt bereikt.

## De J-hook heeft de volgende voordelen:

1. De linker en rechter haak zijn niet verbonden. Als een van beide losraakt, wordt hij naar buiten en van het gezicht afgetrokken.
2. De voor- en achterwaartse beweging van de J-hook wordt beperkt door het gebogen uiteinde en de gelaste elastiekhak. (afb. A)
3. Het high-pull hoofdkapje heeft bovendien het voordeel dat de buis uit het bijstellingslot wordt getrokken als er plotseling hard aan wordt getrokken.



| ITEM  | BESTELNR.   |
|---|---|
| <b>Hoofdkapjes, J-hooks en accessoires</b>                        |   |
| Variable-pull hoofdkapje (5/pak)                                  | Zwart 300-100<br>Marineblauw 300-101<br>Bruin 300-102 |
| High-pull hoofdkapje (5/pak)                                      | Zwart 300-107<br>Marineblauw 300-103<br>Bruin 300-105 |
| Quick-fit hoofdkapje (5/pak)                                      | 300-104   |
| J-hook voor cuspidaat-/schuifboogslotretractie: (5 paar/pak)      | 300-121   |
| J-hook voor premolaarretractie (5 paar/pak)                       | 300-122   |
| J-hook voor cuspidaat-/schuifboogslotretractie: Lang (5 paar/pak) | 300-123   |
| High-pull retractie-J-hook (5 paar/pak)                           | 300-125   |
| High-pull retractie-J-hook: Lang (5 paar/pak)                     | 300-126   |
| Roestvrijstalen buizen voor variable-pull hoofdkapje (10/pak)     | 300-131   |
| Opklikbare buizen voor Quick-fit hoofdkapje (10/pak)              | 300-132   |
| Opklikbare haken voor Quick-fit hoofdkapje (10/pak)               | 300-133   |
| Opschuifbare stoffen kussentjes (20/pak)                          | 300-134   |
| Opklikbare kussentjes voor alle hoofdkapjes (20/pak)              | 300-135   |
| <b>Protractie-headgear en vervangingsonderdelen</b>               |   |
| Klein facemask  | 300-306   |
| Groot facemask  | 300-307   |
| Kleine Hickam   | 300-308   |
| Grote Hickam  | 300-309   |
| Hoofdband voor Hickam (beide groottes)                            | 300-312   |
| Voorhoofdsband en borgmoeren voor facemask (beide groottes)       | 300-313   |
| Borgmoeren voor voorhoofdsband (2/pak)                            | 300-314   |
| Plastic beschermtips (10/pak)                                     | 300-316   |

**BELANGRIJKE HERINNERING VOOR ARTSEN!** Om het risico op oogletsel te voorkomen, dient u de patiënten en ouders op de hoogte te stellen van de juiste veiligheidsvoorzorgen bij het plaatsen en verwijderen van headgear. Waarschuw patiënten ook tegen ruw of riskant spel terwijl ze de headgear dragen.



**Great Lakes**  
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150  
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626  
GREAT PEOPLE. GREAT PRODUCTS. GREAT LAKES.