

# Great Lakes NOLA quick-fit hoofdkapje

Plaats de drukknop aan het uiteinde in de gewenste opening, en druk of rol vervolgens elke volgende drukknop in de bijbehorende opening terwijl u de banden in een gebogen vorm houdt.

Zachte gegoten kunststof


Volledig verstelbare banden  
Past iedere patiënt  
Geen krammen nodig

Zes klikposities die een krachtvector leveren van 10° onder tot 40° boven het occlusievlak


Gemakkelijk te bevestigen buizen voor gebruik met J-hooks

Gemakkelijk te bevestigen elastieken banden voor gebruik met facebows

Druksluitingen en kussentjes zijn vervangbaar (300-135)

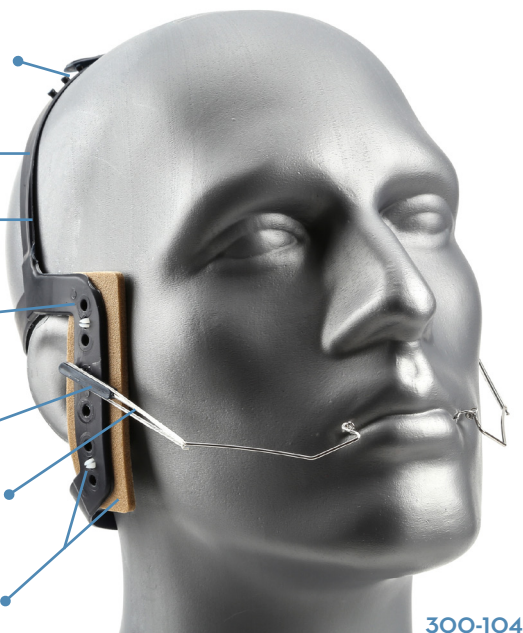

300-104

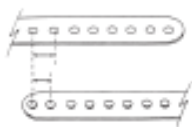

De openingen in de band zijn niet recht tegenover de drukknopen geplaatst, zodat de band een boog vormt wanneer ze worden samengedrukt.



**BESTELINFORMATIE AAN ACHTERKANT ►**

## Het veiligheidsvoordeel van de NOLA headgear met J-hook

In vergelijking met de breakaway apparaten die worden gebruikt met de momenteel verkrijgbare facebows, is J-hook headgear even veilig of veiliger. Facebows zijn potentieel gevaarlijk omdat beide zijden zijn bevestigd en de uiteinden van de binnenkant op het gezicht gecentreerd zijn.

Bovendien kan bij de meeste breakaway apparaten de facebow uit de mond worden genomen voordat een afbreekkracht wordt bereikt.

## De J-hook heeft de volgende voordelen:

1. De linker en rechter haak zijn niet verbonden. Als een van beide losraakt, wordt hij naar buiten en van het gezicht afgetrokken.
2. De voor- en achterwaartse beweging van de J-hook wordt beperkt door het gebogen uiteinde en de gelaste elastiekhak. (afb. A)
3. Het quick-fit hoofdkapje heeft bovendien het voordeel dat de buis uit het hoofdkapje wordt getrokken als er plotseling hard aan wordt getrokken.



Afb. A

ITEM	BESTELNR.
<b>Hoofdkapjes, J-hooks en accessoires</b>	
Variable-pull hoofdkapje (5/pak)	Zwart 300-100 Marineblauw 300-101 Bruin 300-102
High-pull hoofdkapje (5/pak)	Zwart 300-107 Marineblauw 300-103 Bruin 300-105
Quick-fit hoofdkapje (5/pak)	300-104
J-hook voor cuspidaat-/schuifboogslotretractie: (5 paar/pak)	300-121
J-hook voor premolaarretractie (5 paar/pak)	300-122
J-hook voor cuspidaat-/schuifboogslotretractie: Lang (5 paar/pak)	300-123
High-pull retractie-J-hook (5 paar/pak)	300-125
High-pull retractie-J-hook: Lang (5 paar/pak)	300-126
Roestvrijstalen buizen voor variable-pull hoofdkapje (10/pak)	300-131
Opklikbare buizen voor Quick-fit hoofdkapje (10/pak)	300-132
Opklikbare haken voor Quick-fit hoofdkapje (10/pak)	300-133
Opschuifbare stoffen kussentjes (20/pak)	300-134
Opklikbare kussentjes voor alle hoofdkapjes (20/pak)	300-135
<b>Protractie-headgear en vervangingsonderdelen</b>	
Klein facemask	300-306
Groot facemask	300-307
Kleine Hickam	300-308
Grote Hickam	300-309
Hoofdband voor Hickam (beide groottes)	300-312
Voorhoofdsband en borgmoeren voor facemask (beide groottes)	300-313
Borgmoeren voor voorhoofdsband (2/pak)	300-314
Plastic beschermtips (10/pak)	300-316

**BELANGRIJKE HERINNERING VOOR ARTSEN!** Om het risico op oogletsel te voorkomen, dient u de patiënten en ouders op de hoogte te stellen van de juiste veiligheidsvoorzorgen bij het plaatsen en verwijderen van headgear. Waarschuw patiënten ook tegen ruw of riskant spel terwijl ze de headgear dragen.

