


# The Great Lakes reverse-facemasks

## Comfortabele passing . . . Comfortabele prijs

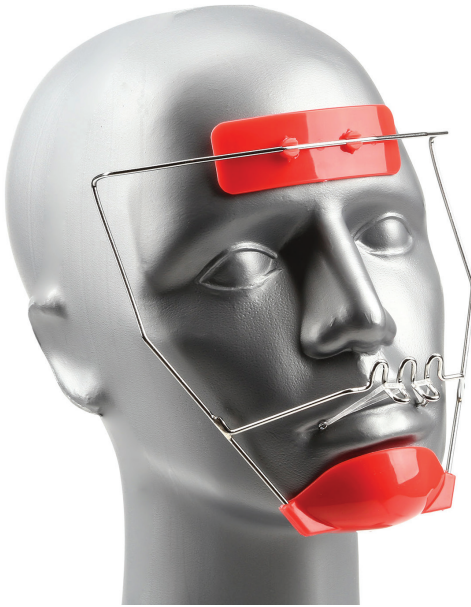

### **Alleen voor eenmalig gebruik**

Verkrijgbaar in geelbruin, blauw, rood, dieproze en paars in klein, med en groot.

#### BESTELNR.

Kleur	Klein	Med	Groot
Geelbruin	GTS	GTM	GTL
Blauw	GBS	GBM	GBL
Rood	GRS	GRM	GRL
Dieproze	GPKS	GPKM	GPKL
Paars	GPRS	GPRM	GPRL

#### Tas voor headgear verkrijgbaar.

Zwart.....830

### **Gel voering voor voorhoofd en kinhouder voor maximaal comfort (LATEXVRIJ)**

Wasbare, herbruikbare gel voering vermindert:

- Wrijving
- Abrasie
- Schuifkracht
- Druk

### **Voorhoofdsteun**

- Groter voor meer comfort voor de patiënt.
- Breukbestendige clips blijven stevig aan het frame bevestigd.
- Gevormd van lichte kunststof.

### **Mondboog**

- 0,075 gauge draad.
- Grotere stabiliteit en spankracht.
- Gebruikt met intraoraal anker van uw keuze.

### **Kinhouder**

- Aan frame gegoten om draaiing te elimineren.
- Grotere kinhouder voor meer comfort voor de patiënt.
- Gevormd van lichte kunststof.

Door de constructie van lichtgewicht roestvrij staal en goede passing om het gezicht zijn hoofdbanden niet nodig.

### **Totaal zicht**

- Geen visuele obstructies.
- Kan met een bril worden gedragen.

### **Afstelpunten**

- Zorgt voor perfecte passing voor elk gezicht, ongeacht de vorm.

### **Functie**

- Klasse III: Naar voren trekken om de kaakboog naar voren te brengen.
- Klasse II: Naar voren trekken aan de onderkaak. Uitstekend om tanden (individueel of meerdere) naar voren te brengen.

Elastiek: 5/16" extra zwaar non-latex elastiek  
7,9 mm-8 oz. (100/pak.)

Elastiek: niet verkocht in Canada

## Instructies voor passing op maat

### (A) AFSTELLEN EN PASSEN

- (B) Om tijdens het slapen op zijn plaats te blijven, moet het facemask goed aangepast zijn aan de vorm van het voorhoofd en de wangen. Afstellingen kunnen worden gemaakt met een afsteltang op punt A en/of B.


\*Afsteltang 220-022

- (C) Afstellen voor een langer of korter gezicht. Kussentje moet boven de wenkbrauwen zijn voor maximaal oppervlaktecontact zodat de patiënt kan praten zonder het facemask te verplaatsen.

- (D) Zorg dat het hulpmiddel niet tegen het jukbeen drukt.

- (E) Lijn de facebow precies uit met de tanden iets onder de mondlijn. Deze lichte opwaartse druk zorgt dat het facemask steviger op zijn plaats wordt gehouden.

- (F) Enige bijstelling omhoog of omlaag kan nodig zijn in verband met de stand van de individuele onderkaak en/of de kinspielen.

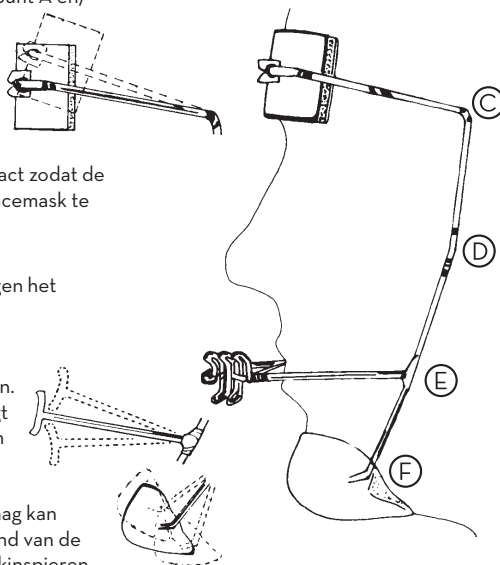

## Reverse-facemask

Het reverse-facemask was oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van afwijkingen aan de bovenkaak en voor mandibulaire prognathie. Toen onze klanten meer toepassingen voor de voorwaartse trekkracht van het facemask meldden (klasse II en sluiten van ruimten), werden er verfijningen aangebracht. Er werd een kinhouder toegevoegd voor grotere stabiliteit. Het frame werd gewijzigd om verschuivingen te voorkomen, zelfs tijdens het slapen. De facebow werd gewijzigd voor meer spankracht en optimale veiligheid van de patiënt.

Voor na 30 dagen geretourneerde artikelen worden 15% annuleringskosten berekend, tenzij het artikel tijdens het vervoer was beschadigd of bij vergissing was verzonden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte hulpmiddelen.

## BELANGRIJKE HERINNERING VOOR ARTSEN!

Om het risico op oogletsel te voorkomen, dient u de patiënten en ouders te informeren over de juiste veiligheidsvoorzorgen bij het plaatsen en verwijderen van headgear. Waarschuw patiënten ook tegen ruw of riskant spel terwijl ze de headgear dragen.



Great Lakes<sup>®</sup>  
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150  
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626  
Great People. Great Products. Great Lakes.